

DILUENT 90

PĂSTRAȚI ÎNTOTDEAUNA ACEST PROSPECT LA ÎNDEMÂNĂ ȘI CITIȚI-L CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE. DACĂ A AVUT LOC SAU ESTE POSIBIL SĂ FI AVUT LOC UN INCIDENT GRAV LEGAT DE DISPOZITIV, VĂ RUGĂM SĂ ÎL RAPORTAȚI DIRECT PRODUCĂTORULUI SAU PRIN INTERMEDIUL REPREZENTANTULUI AUTORIZAT ȘI AUTORITĂȚII DVS. LOCALE DE REGLEMENTARE.

SCOP PROPUS

DILUENT 90 este destinat pentru diluarea materialelor de control disponibile pe piață pentru utilizarea împreună cu HA-8190V, care este destinat măsurării cantitative a HbA1c. DILUENT 90 este destinat și pentru diluarea probelor de sânge integral. Numai pentru diagnostic *in vitro* și pentru uz profesional.

AVERTISMENTE

- Dacă DILUENT 90 intră în contact cu ochii sau gura, spălați imediat cu multă apă și consultați un medic.
- Dacă intră în contact cu pielea, spălați cu multă apă.
- Aruncați deșeurile lichide care conțin sânge în conformitate cu reglementările locale pentru deșeurile periculoase biologice.

PRECAUȚII

- Numai pentru diagnostic *in vitro*.
- Acest produs este destinat numai pentru HA-8190V. NU încercați să îl utilizați cu alte instrumente. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al instrumentului.
- NU utilizați acest set după data de expirare.
- Data de expirare este înscrisă atât pe cutie, cât și pe eticheta flaconului.
- După deschidere, păstrați flaconul la o temperatură cuprinsă între 2°C și 8°C pentru a preveni contaminarea cu microbii patogeni.
- Citiți cu atenție prospectul care însoțește controalele disponibile pe piață înainte de utilizare.
- Evitați amestecarea reactivilor după deschiderea flaconului.
- NU utilizați controlul pregătit dacă prezintă turbiditate sau materii străine.
- Păstrați proba de sânge integral diluată și controlul diluat la o temperatură cuprinsă între 2°C și 8°C și utilizați în decurs de 8 ore. Utilizarea după 8 ore poate produce rezultate de măsurare inexacte.

PROCEDURĂ

- Probe de sânge integral (pregătirea probelor de hemoliză)
- Adăugați volumul corespunzător de DILUENT 90 la probele de sânge integral.
- Concentrația de hemoglobină măsurabilă a unei probe de hemoliză diluată de HA-8190V este de 75 - 225 mg/dL (standard 150 mg/dL).
- Dacă concentrația nu se încadrează în acest interval, poate fi afișat un mesaj de eroare sau reproductibilitatea poate fi diminuată.
- Dacă se întâmplă acest lucru, modificați raportul de diluție în mod corespunzător pentru a ajusta concentrația înainte de a efectua din nou măsurarea. (HA-8190V folosește sânge integral diluat de 101 ori.)

DEPOZITARE

Nedeschis: Depozitați într-un loc întunecat, la o temperatură cuprinsă între 2°C și 30°C, evitând lumina directă a soarelui.
Deschis: Păstrați cu capacul strâns la o temperatură cuprinsă între 2°C și 8°C.

MATERIALE FURNIZATE

DILUENT 90: 250 mL X 1 flacon, tampon fosfat care conține surfactant.
Materialele flaconului:

Flacon din polietilenă (PE) cu capac interior din PE și capac exterior din polipropilenă (PP).



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Date de contact pentru asistență tehnică
[TEL: +31-20-545-24-50]

