

Tiskárna PocketChem

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tiskárnu PocketChem.

Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.

Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením PocketChem.

Pokud došlo nebo mohlo dojít k vážné nehodě související s tímto prostředkem, nahlase to přímo nebo prostřednictvím autorizovaného zástupce výrobce a místnímu regulačnímu úřadu.

Zamýšlený účel

Tiskárna PocketChem je vyhrazená tiskárna s tepelným záznamem pro použití s PocketChem BA (PA-4140) a PocketChem UA (PU-4010), které jsou určeny pro kvalitativní, semikvantitativní a/nebo kvantitativní měření několika fyziologických markerů. Pouze pro diagnostické použití *in vitro* a profesionální použití. Tento přístroj není určen pro použití na testování v blízkosti pacienta.

Tento produkt je v souladu s normou EMC IEC61326-2-6:2012 (EN61326-2-6:2013).

Třída emisí: CISPR 11 třídy A

Tento přístroj je lékařským přístrojem IVD.



Tento produkt splňuje požadavky Nařízení (EU) 2017/746.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy A v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení, když je zařízení provozováno v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení a v takovém případě uživatel bude muset rušení odstranit na své vlastní náklady.

Před uvedením zařízení do provozu je třeba vyhodnotit elektromagnetické prostředí. Nepoužívejte toto zařízení v těsné blízkosti zdrojů silného elektromagnetického záření, protože mohou narušovat správnou funkci.



Aby bylo možné tiskárnu používat, musí být připojena přímo k přístroji. Proto může být také tiskárna kontaminována patogenními mikroorganismy. Při připojování, odpojování a skladování tiskárny dbejte opatrnosti, abyste zabránili vystavení patogenním mikroorganismům.

Symbols

V tomto návodu a na štítcích na tomto přístroji jsou použity následující symboly, které vás mají upozornit na konkrétní položky.


■ Pro vaši bezpečnost



Dodržujte zde uvedené pokyny, abyste předešli expozici patogenním mikrobům.

Vybalení

Balení by mělo obsahovat součásti uvedené níže. Zkontrolujte, zda je vše obsaženo. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte svého distributora.

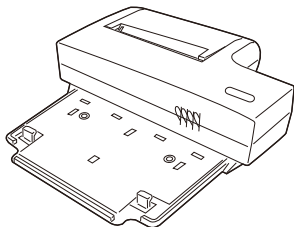

■ Tiskárna PocketChem



■ Stylusové pero
(Uloženo v tiskárně)



■ Papír do tiskárny



■ Návod k obsluze
(tento návod)

Potřebný materiál, který není součástí dodávky

- PocketChem BA PA-4140
- PocketChem UA PU-4010
- Napájecí kabel
- AC adaptér

Specifikace tiskárny

Tiskárna	Tiskárna s tepelným záznamem
Papír do tiskárny	Termopapír s vysokou schopností vyvolání barev (Š 58 mm × Ø 26 mm)
Provozní prostředí	Teplota: 10–35 °C; Vlhkost: 25–85 % rel. vlhk.
Prostředí měření	Teplota: 10–35 °C; Vlhkost: 25–85 % rel. vlhk.
Prostředí skladování	Teplota: 1–35 °C; Vlhkost: 20–85 % rel. vlhk. (nekondenzující)
Prostředí během přesunu	Teplota: -10–60 °C; Vlhkost: 20–85 % rel. vlhk. (nekondenzující)
Rozměry	125 (Š) × 133 (H) × 36 (V) mm
Hmotnost	180 g (bez papíru do tiskárny)
Zdroj napájení	AC adaptér 7,5 V 3 A
Spotřeba energie	20 W
Připojení	Připojení jedním dotykem
Spojení	Kontaktní
Očekávaná životnost	5 let od prvního použití (instalace) přístroje (podle údajů společnosti)

Používání


K připojení/odpojení tiskárny k/od přístroje postupujte podle níže uvedeného postupu. V tomto návodu k obsluze je jako příklad použito zařízení PocketChem UA (PU-4010). Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením PocketChem.

POZNÁMKA: Před připojením nebo odpojením tiskárny vypněte napájení a odpojte AC adaptér z elektrické zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození přístroje a tiskárny. Tiskárna může tisknout nesmyslné údaje, pokud je náhodně připojena nebo odpojena během připojení k elektrické zásuvce. To však neznamená, že s tiskárnou není něco v pořádku.

■ Jak připojit


POZNÁMKA: Tiskárna je napájena pouze střídavým proudem, nikoli bateriemi.
Jakmile je tiskárna připojena k přístroji, připojte přístroj přes tiskárnu k elektrické zásuvce.

1. Umístěte přístroj na tiskárnu pod úhlem, jak je znázorněno na obrázku.
2. Zatlačte na horní část přístroje, aby zapadl na místo.
3. Ujistěte se, že horní části přístroje a tiskárny jsou ve vodorovné rovině a že obě jednotky jsou vzájemně pevně spojeny.

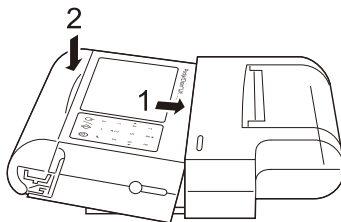

■ Jak odpojit

1. Umístěte přístroj na rovnou plochu (například na stůl).
2. Zatlačte na kryt nad displejem v bodě, který je v jedné rovině se středem displeje (a), a zvedněte zespodu kryt čtecí jednotky (b).

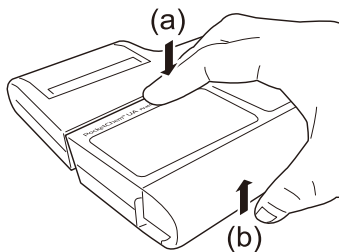

ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Pokud potřebujete technickou podporu,
kontaktujte ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

