

Concentrated Washing Solution 3

Lugege see pakendi infoleht hoolikalt enne kasutamist läbi. Hoidke see käepärast, kui vaja. Kui teil esines või oleks võinud esineda seadmega seoses tõsine juhtum, teavitage palun viivitamata tootjat või volitatud esindajat ning oma kohalikku järelevalveasutust.

Kasutusotstarve

Concentrated Washing Solution 3 on pesulahus, mida kasutatakse koos toodetega AX-4060 või AI-4510, mis on mõeldud mitmete füsioloogiliste markerite kvalitatiivsete, pool-kvantitatiivsete ja/ või kvantitatiivsete väärtuste mõõtmiseks uriinis. Ainult *in vitro* diagnostikaks ja erialaseks kasutamiseks.

Koostis

Kolmelõimeline naatriumfosfaat, 0,2% (CAS nr 7601-54-9)
Polüoksütüleen-alküül(12-14)eedrid, 1% (CAS nr 84133-50-6)

Kasutamine

Lahjendage kontsentreeritud lahus deioniseeritud veega suhtes 1:9 (1 osa kontsentreeritud lahust lahjendatuna 9 osa deioniseeritud veega). Lugege analüsaatori kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

Hoiatus

1. Pärast lahjendamist võivad lahuses hakata kasvama seemned ja/või bakterid. Palun kasutage lahjendatud pesulahus pärast lahjendamist 15 päeva jooksul.
2. Kasutage pesulahus selle säilimisaja kestel. Kui hoiustamine pole korrektne, siis selle piisav toimimine ei säili ka säilimisaja vältel.
3. Vältige hoiustamisel otsest päiksevalgust.
4. Kokkupuutel silmadega peske viivitamata ja hoolikalt kraaniveega. Pöörduge vajaduse korral arsti poole.
5. See toode on aluseline pesulahus. ÄRGE jooge. Kandke turvalisuse tagamiseks kaitsekindaid.

Bioloogiliselt ohtlike jäätmete käitlemine

Käideldge vedelikujäätmed vastavalt teie kohalikele bioloogiliselt ohtlike jäätmete määrustele.

Hoiustamine ja stabiilsus

1. Hoiustamine
Hoiustage toatemperatuuril (1–30°C).
2. Säilivusaeg
Trükitud pudeli etiketile ja välispakendile.

Kaasasolevad materjalid

Concentrated Washing Solution 3 1 l x 5 pudelit

Vajalikud, kuid mitte kaasasolevad materjalid

Proovikatsuti (kui kasutatakse koos tootega AI-4510)



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Tehnilise abi saamiseks pöörduge
[TEL: +31-20-545-24-50]

