

Hemolysis Solution

TENERE SEMPRE A PORTATA DI MANO IL PRESENTE FOGLIETTO ILLUSTRATIVO E LEGGERLO ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO. QUALORA SI FOSSE VERIFICATO O SI SAREBBE POTUTO VERIFICARE UN INCIDENTE GRAVE CORRELATO AL DISPOSITIVO, SI PREGA DI SEGNALARLO DIRETTAMENTE AL FABBRICANTE O, TRAMITE IL RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO, ALL'AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE LOCALE.

DESTINAZIONE D'USO

La Hemolysis Solution è destinata alla diluizione di campioni di sangue intero per l'utilizzo con i dispositivi HA-8180V, HA-8180T o HA-8190V, utilizzati per la determinazione quantitativa di HbA1c. Da utilizzarsi esclusivamente per la diagnostica *in vitro* e solo in ambiente professionale.

AVVERTENZE

- Questo prodotto contiene sodio azide (NaN₃) in quantità inferiore allo 0,02%; tale sostanza conservante può causare irritazioni alle mucose.
- La sodio azide può reagire a contatto con il rame o il piombo, generando azidi metalliche potenzialmente esplosive.
- La sodio azide può inoltre reagire a contatto con gli acidi dando origine a idrogeno azide, una sostanza tossica ed esplosiva.
- Di conseguenza, per lo smaltimento di questi materiali è necessario diluirli in un volume di acqua adeguato, al fine di prevenire il deposito di residui di reagente nelle tubazioni di servizio dell'acqua.
- Se la Hemolysis Solution dovesse venire a contatto con gli occhi o con la bocca, lavare immediatamente con abbondante acqua corrente e consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle, lavare con abbondante acqua corrente.
- Smaltire i liquidi di scarico contenenti campioni di sangue secondo quanto previsto dalla normativa locale in materia di rifiuti sanitari pericolosi.

PRECAUZIONI

- Da utilizzarsi esclusivamente per la diagnostica *in vitro*.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo con i dispositivi HA-8180V, HA-8180T o HA-8190V. NON utilizzare con altri strumenti. Consultare il manuale operativo dello strumento.
- NON utilizzare il set dopo la data di scadenza indicata.
- La data di scadenza è indicata sia sulla confezione sia sull'etichetta del flacone.
- Dopo l'apertura, conservare il flacone a una temperatura compresa fra 2 °C e 8 °C per prevenire l'esposizione ai germi patogeni.
- Evitare di mescolare i reagenti dopo l'apertura del flacone.
- NON utilizzare il campione di sangue intero diluito preparato qualora risulti torbido o contenga corpi estranei.
- Conservare il campione di sangue intero diluito a una temperatura compresa fra 2 °C e 8 °C e utilizzarlo entro 12 ore. L'utilizzo oltre le 12 ore può produrre risultati di analisi imprecisi.

PROCEDURA

Campioni di sangue intero (preparazione dei campioni emolisi)

- Una provetta contiene 1,0 mL di Hemolysis Solution: aggiungere 10 µL di sangue intero utilizzando una capillare "da un'estremità all'altra". Lasciare cadere la capillare direttamente nella provetta contenente la Hemolysis Solution, chiudere la provetta e agitarla per far fuoriuscire il sangue dalla capillare nella Hemolysis Solution. Quindi rimuovere il tappo e inserire il campione nello strumento. In alternativa, trasferire il campione in una coppetta per campioni prima di inserirlo nello strumento.

CONSERVAZIONE

Confezioni chiuse: conservare al buio, a una temperatura compresa fra 3 °C e 30 °C, lontano dalla luce diretta del sole.

Confezioni aperte: conservare con il tappo ben chiuso, a una temperatura compresa fra 2 °C e 8 °C.

MATERIALI IN DOTAZIONE

Hemolysis Solution: 100 flaconi da 1 mL, tampone fosfato contenente tensioattivi.

Materiali del flacone: flacone in polistirene (PS) con tappo esterno in polietilene a bassa densità (LDPE).

MATERIALI NECESSARI NON IN DOTAZIONE

Fare riferimento al manuale operativo dello strumento.

RACCOLTA DEI CAMPIONI

Fare riferimento al manuale operativo dello strumento.

CONTROLLO QUALITÀ

Fare riferimento al manuale operativo dello strumento.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contatto per l'assistenza tecnica
[TEL: +31-20-545-24-50]

